

Navliekač a vyzuvák ponožiek



Navliekač a vyzuvák ponožiek sú novinkami na trhu a majú široké zameranie pre ľudí s rôznymi zdravotnými problémami.

Pomôcky sú vhodné pre navliekanie a vyzúvanie všetkých druhov ponožiek vrátane silonových a špeciálnych kompresívnych ponožiek na krčové žily.

Tieto pomôcky uvítajú predovšetkým ľudia, ktorí majú problémy s chrbticou, kĺžami, bedrami, kolenami, kĺbmi a pod., ďalej ľudia po úrazoch, ľudia trpiaci nadváhou, tehotné ženy a v neposlednom rade ľudia v staršom veku.

Sami se presvedčte, ako jednoducho si s pomocou navliekača ponožiek navlečiete ponožky a s pomocou vyzuváku ponožky vyzujete, úplne bez cudzej pomoci, bez nutnosti ohýbania sa, iba s pomocou jednej ruky.




„Navliekač a vyzuvák ponožiek sú praktické a jednoduché pomôcky, ktoré uľahčia život ľuďom s pohybovým ochorením všetkých vekových kategórií. Ocenia ho nielen seniori s kĺbovým ochorením chronického charakteru, ale i mladší ľudia napr. po úrazoch, po operáciách medzistavcových platničiek. Používať tieto pomôcky môžete pri všetkých diagnózach bez akéhokoľvek obmedzenia.“



primár, rehabilitácie

Postup navliekania

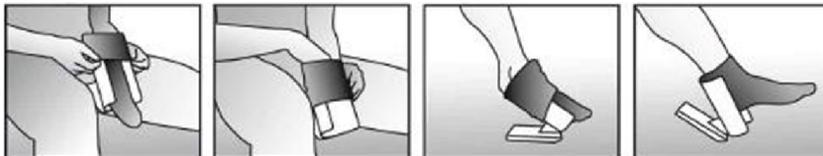

Navliekač pridržime medzi stehnami, potom ponožku vložíme do priehlbiny pomôcky, ľem prehne cez horný okraj navliekača. Ponožku navlečíeme cez celé telo pomôcky smerom dolu tak, aby zostala voľná chodidlová časť.

Pomôcku s ponožkou položíme na zem, najlepšie na koberec. Špičku chodidla zachytíme v ponožke a zasuneme podľa potreby do tela pomôcky. Pomôcku nastavíme kolmo na podložku (gumou doľu), potom chodidlo zatačíme do ponožky. Došlápnutím päty dolu, špičkou hore na podlahu dôjde k navleknutiu ponožky.

Postup vyzúvania



Pomôcku vezmeme do ruky a palec vložíme do výrezu v rukoveti. Pomôcku zasuneme na lem ponožky (punčochy) a päť zasuneme do otvoru v pomôčke.

Po zasunutí päty do otvoru prísľapneme na podlahu. Následne si prísľapneme pomôcku druhou nohou a nohu s ponožkou prisunieme smerom k sebe, čím dôjde k vyzutiu - zvlieknutiu ponožky.

Ponožka zostane na pomôčke. Štápnutím na rukoväť pomôcky dôjde k jej vzpriameniu i s ponožkou.

Obidve pomôcky môžete rozobrať na dve časti. Balenie zabezpečuje miestne združenie invalidov.

Pomôcky si môžete objednať / zakúpiť na našej webovej stránke prostredníctvom mailu, prípadne objednať telefonicky alebo písomne.

Pomôcky vám budú doručené dobierkou na adresu v najkratšom možnom termíne, v prípade väčšieho množstva nad 10ks a požadovanej prezentácie pomôcky dovezieme osobne maximálne do 14 pracovných dní od prijatia objednávky.

Výrobcom a konštruktérom vyrobené pomôcky sú patentovo chránené, môžete si ich zakúpiť od našich zmluvných distribučných a obchodných partnerov.